

فروشگاه اینترنتی سیان شاپ
ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق
www.seeanshop.com

در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزار دقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات KYORITSU و HIOKI محصول کشور ژاپن، ابزارهای برند FLUKE و HANNA محصول کشور آمریکا، ابزارهای TESTO محصول کشور آلمان، تجهیزات KIMO محصول کشور فرانسه و همچنین تجهیزات صنعتی LUTRON محصول کشور تایوان و ... وجود دارد.

شرکت فنی مهندسی سیانکو
تلفن تماس: 021-47627010 و 051-37133896
www.seeanco.com & seeanco.ir

تهران، میدان صادقیه، برج گلдіس
مشهد، خیابان صاحب الزمان نبش صاحب الزمان هشت

سیانکو
SEENCO

تاریخ انتشار

2018



Non-Contact Infrared Thermometer MS6518

ترموتر پزشکی MASTECH MS6518

دماسنج پزشکی غیر تماسی مستک مدل MS6518

ترموتر لیزری پزشکی مدل MS6518

این ترمومتر تفنگی دیجیتالی جزء دماسنج های مناسب برای کاربردهای پزشکی می باشد. دماسنج لیزری MASTECH MS6518 با دقت بسیار بالا و سنجش دما بین 30 تا 42 درجه سانتی گراد در سنجش درجه حرارت بدن بیماران به پزشکان و کادر تخصصی بیمارستانی و کلینیکی کمک می رساند.

مشخصات فنی دستگاه ترمومتر لیزری | پزشکی مدل MS6518

- دارای حافظه برای ذخیره سازی 10 گروه داده اندازه گیری شده
- صفحه نمایش LCD با قابلیت نمایش دما با یک رقم اعشار
- استفاده از مادون قرمز برای اندازه گیری دما
- دارای نور پس زمینه برای روشن شده صفحه نمایش در مکان های تاریک
- قابلیت نمایش دما در واحد سانتی گراد و فارنهایت
- رنج اندازه گیری دما در بازه 32+ تا 42+ درجه سانتی گراد
- نمایش عبارت LO و HI برای دما های خارج از رنج
- خطای اندازه گیری دما حداکثر تا 0.4 درجه سانتی گراد
- تفکیک پذیری نمایش دما تا 0.1 درجه سانتی گراد
- فاصله اندازه گیری بین 5 تا 15 سانتی متر
- زمان نمونه برداری تا 1 ثانیه
- نمایش وضعیت باتری ضعیف
- خاموشی خودکار بعد از 15 ثانیه
- ابعاد کوچک و بسیار خوش دست
- تغذیه توسط باتری 9 ولت کتابی
- ابعاد دستگاه 142*92*47 میلی متر
- دمای محیط کاری 15 تا 35+ درجه سانتی گراد
- وزن 135 گرم



MASTECH MS6518



راهنمای استفاده از ترمومتر پزشکی مستک مدل MASTECH MS6518

شرح دستگاه

این دستگاه با استفاده از اصل القاء مادون قرمز میتواند سریع ، دمای دقیق بدن فرد را به پزشک یا پرستار نشان دهد ، ویژگی مثبت این ترمومتر پزشکی سرعت بالای آن در اندازه گیری میباشد که این امر میتواند به پیگیری بیماران بیشتری در زمان کم ، به پزشک یا پرستار کمک بسیاری کند.


ویژگی ها و مشخصات فنی دستگاه شامل:

جبران اتوماتیک دما

اندازه گیری 32 تا 42 درجه سانتیگراد

ذخیره سازی اتوماتیک تا 10 گروه داده

تبدیل واحد به فارنهایت و سانتیگراد

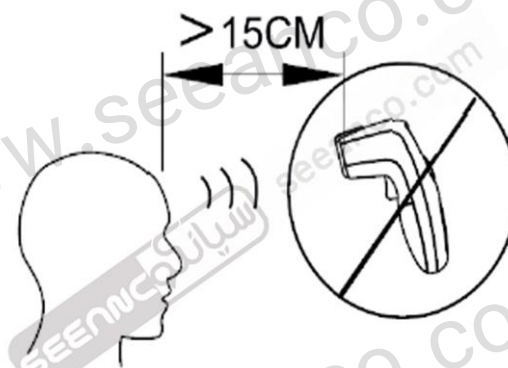


عملکرد ترمومتر

برای اندازه گیری درجه حرارت بدن، فاصله اندازه گیری بین 5 تا 15 سانتیمتر پیشنهاد شده است، برای شروع اندازه گیری ماشه قسمت تفنگی دستگاه را برای 1 ثانیه فشار دهید تا برای اندازه گیری کامل ، آلامر دستگاه به صدا در آید ، هنگامی که درجه حرارت بیشتر از 42 درجه سانتیگراد یا کمتر از 32 درجه سانتیگراد باشد دستگاه LOW , HI را نمایش می دهد.

MASTECH MS6518



سیانکو SEEANCO seeanco.com

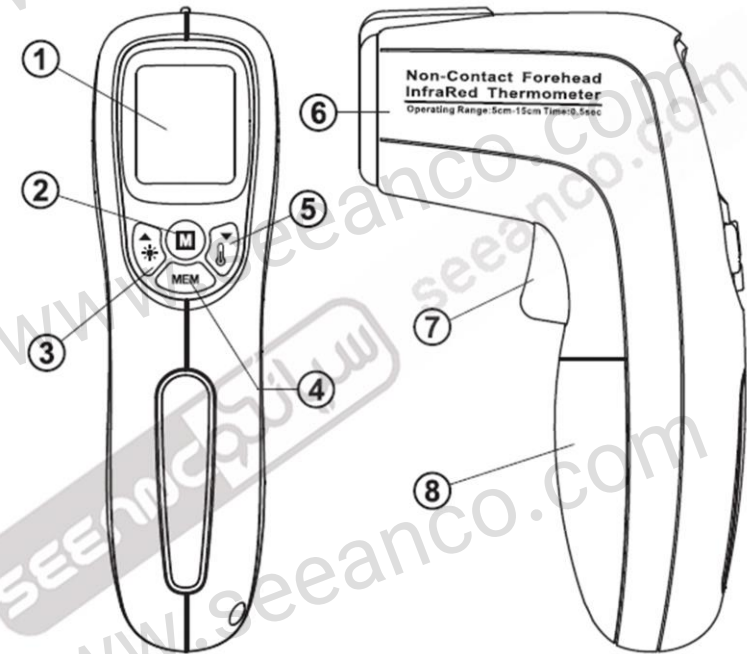


- 1- صفحه نمایش
- 2- کلید تغییر مد
- 3- کلید روشنایی پس زمینه
- 4- کلید ذخیره سازی
- 5- کلید تغییر واحد اندازه گیری از درجه سانتی گراد به فارنهایت
- 6- سنسور و لنز اندازه گیری
- 7- ماشه
- 8- محل قرار دادن باتری

MASTECH MS6518



سیانکو SEEANCO seeanco.com

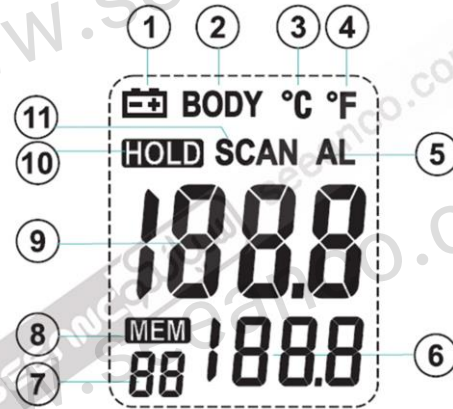

- 1-علامت تعویض باتری
- 2-اندازه گیری درجه حرارت بدن به ویژه پیشانی
- 3-درجه حرارت سانتی گراد
- 4-درجه حرارت فارنهایت
- 5- فعال شدن آلارم
- 6- عدد اندازه گیری شده ثانویه
- 7-تعداد داده های ذخیره شده
- 8-فعال شدن ذخیره سازی داده
- 9- عدد اندازه گیری شده اصلی
- 10- حالت HOLD
- 11-حالت SCAN

MASTECH MS6518



سیانکو SEEANCO seeanco.com

عملکرد ترمومتر

برای اندازه گیری درجه حرارت بدن، فاصله اندازه گیری بین 5 تا 15 سانتیمتر پیشنهاد شده است، برای شروع اندازه گیری ماشه قسمت تفنگی دستگاه را برای 1 ثانیه فشار دهید تا برای اندازه گیری کامل، آلارم دستگاه به صدا در آید، هنگامی که درجه HI، حرارت بیشتر از 42 درجه سانتیگراد یا کمتر از 32 درجه سانتیگراد باشد دستگاه را نمایش می دهد LOW.



دماسنج هنگامی که دستگاه بلا استفاده و یا هیچ فعالیت شناسایی نداشته باشد را *دیجیتال بعد از 10 ثانیه خاموش میشود. برای خاموش شدن نور پس زمینه کلید را فشار دهید و M فشار دهید، جهت انتخاب آلارم یا عملکرد تنظیم دستی دما کلید برای سوئیچ کردن بین درجه سانتیگراد یا فارنهایت کلید دارای علامت دماسنج را فشار را فشار دهید MEM دهید. برای فعال کردن عملکرد حافظه کلید



MASTECH MS6518




سیانکو SEEANCO seeanco.com

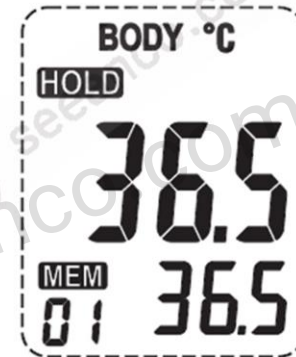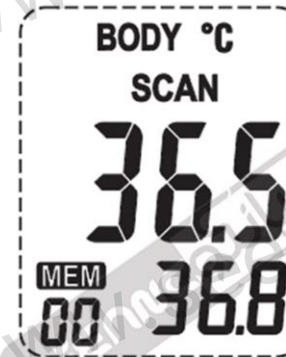

- کلید **MEM** را فشار دهید تا حالت ذخیره سازی داده فعال شود در این حالت علامت **MEM** روی صفحه نمایش ظاهر می شود.
- وقتی حالت **MEM** فعال است بعد از اتمام هر بار اندازه گیری ، داده به طور خودکار به حافظه انتقال می یابد
- در این دستگاه 10 خانه برای ذخیره سازی داده های اندازه گیری شده وجود دارد که به ترتیب 0 تا 9 هستند. به هنگام پر شدن خانه نهم داده خانه صفر به طور خودکار پاک می شود
- با کلید های جهت بالا و پایین بین خانه های حافظه جابه جا شوید.

MASTECH MS6518

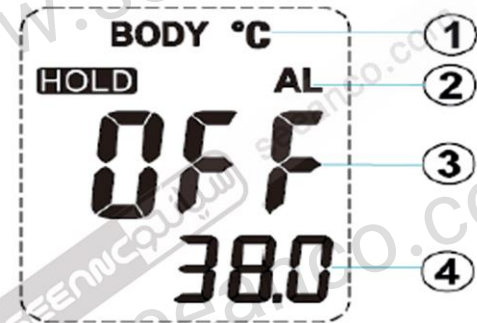


دستورالعمل هشدار

- 1- واحد
- 2- نمایشگر آلارم
- 3- وضعیت عملکرد آلارم
- 4- مقدار آلارم

- برای تغییر عملکرد وضعیت آلارم ، کلید **M** را فشار دهید.
- برای روشن یا خاموش کردن عملکرد آلارم کلید **MEM** را فشار دهید ، پس از روشن شدن عملکرد آلارم ، سیگنال **AL** در حالت اسکن نمایش داده خواهد شد.
- برای افزایش و کاهش صوت آلارم کلید های فلش را فشار دهید.
- برای ذخیره کردن و خارج شدن از موقعیت عملکرد آلارم کلید **M** را فشار دهید.

MASTECH MS6518

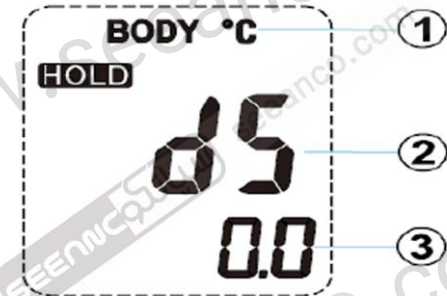

تنظیم دستی درجه حرارت

1- واحد

2- وضعیت تنظیم درجه حرارت

3- مقدار تنظیم درجه حرارت

- برای تغییر وضعیت تنظیم درجه حرارت کلید M را فشار دهید

- برای افزایش مقدار تنظیم کلید جهت بالا را فشار دهید

- برای کاهش مقدار تنظیم کلید جهت پایین را فشار دهید

- برای ذخیره کردن و خارج شدن از وضعیت درجه حرارت کلید M را فشار دهید.

تذکر:

هنگامی که درجه حرارت محیط به سرعت تغییر میکند ، باید قبل از استفاده از دستگاه

30 دقیقه صبر کنید ، تا دمای محیط و دستگاه متعادل شود.

